

# Visière de protection V5

Cette visière est une variante de la version PRUSA (Tchéquie)

<https://www.prusa3d.com/covid19/>

Cette version présente l'avantage de pouvoir être assemblée avec une feuille de plastique transparent format A4 standard, un cutter et une bande élastique du commerce.

La fabrication est une initiative conjointe de InnovLab\*, du département GMP et de la Direction de L'IUT de Cachan qui met les machines de découpe au laser à disposition, fourni la matière première et assure la sécurité de l'opération.

\* Fablab de l'IUT de Cachan.

Kit pour le montage d'une visière – livré décontaminé au four  oui  
 non



- 3 pièces en plastique (Polypropylène : température maxi au four 70°)
- 4 Attaches parisiennes ① ② ③
- 1 sangle de nuque élastique de mercerie (2 cm de largeur, 50 cm de longueur)
- 1 feuille transparente A4 (non montrée sur la photo - ne pas mettre au four)

**NOTA :** L'hôpital Paul Brousse décontamine l'ensemble des éléments régulièrement dans un bac avec du Surfianos pendant au moins 30 minutes suivi d'un rinçage et d'un séchage à l'air.

## NOTICE DE MONTAGE

### ETAPE 1 : Assemblage du serre-tête



Maintenir la pièce ② sur la ① pour faire passer la sangle dans la 1<sup>ère</sup> fente.



Passer ensuite la sangle dans les 2 autres fentes.



Repasser la sangle dans la 1<sup>ère</sup> fente, la laisser dépasser de 4 cm environ et tirer pour serrer.




Retourner le serre-tête pour passer la sangle de l'autre côté. Repasser la sangle dans la 1<sup>ère</sup> fente, la laisser dépasser de 4 cm environ et tirer pour serrer.



## ETAPE 2 : Installation de la visière




Sur une table, positionner la feuille sur la pièce ③.

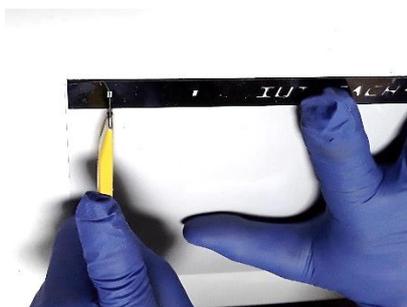

A l'aide d'un cutter, pratiquer une incision en face des 4 fentes tout en maintenant l'ensemble.

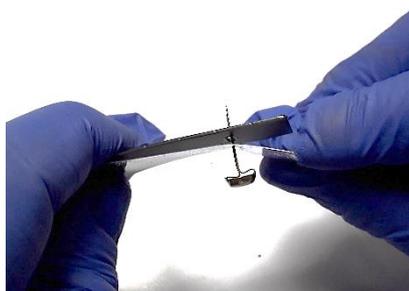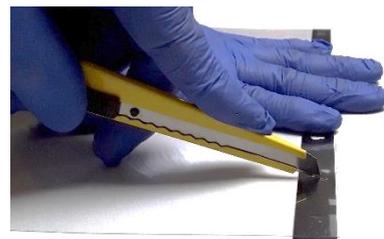

Insérer une attache parisienne à chaque extrémité de la feuille.

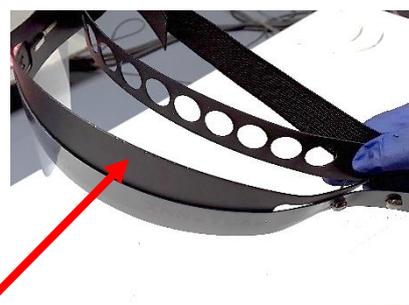

Fixer la visière sur le serre-tête à l'aide des 2 autres attaches.

La forme bombée doit être au-dessus de la visière.



**NOTA :** Pour une protection EXTRA LARGE, découper un autre film en 2 parties dans le sens de la longueur, et l'ajouter à la visière de base selon le même principe que la visière principale.



Contact Produit :

[Lionel.hugues@u-psud.fr](mailto:Lionel.hugues@u-psud.fr)  
[Pascal.martinelli@gmail.com](mailto:Pascal.martinelli@gmail.com)

Tel. 0661729903

Tel. 0632922866